


다람쥐

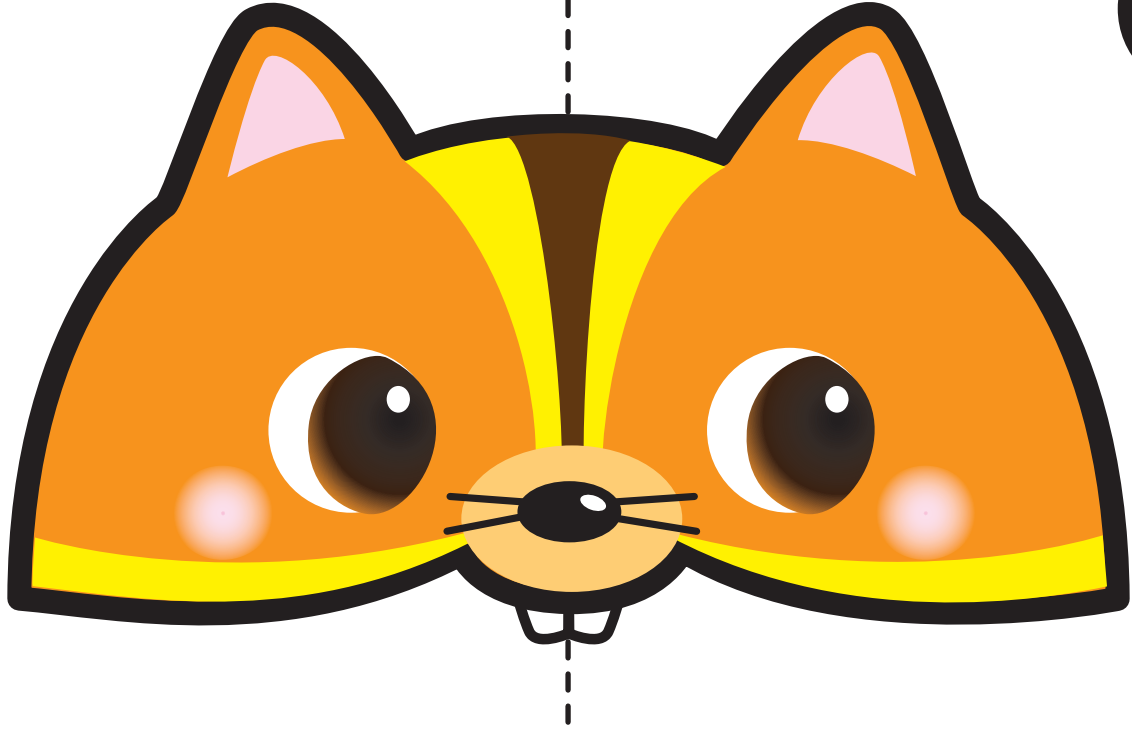

- ① 선을 따라 끊니다 (점선으로 접은 후 잘라도 OK입니다).
- ② 밴드 (약 25mm × 540mm) 을 ①의 뒷면에 테이프로 붙입니다.
- ③ 플라스틱 판 (B6 사이즈) 의 모서리를 둥글게 썰고 ①②의 뒷면에 테이프로 붙입니다.



플라스틱 판


B6 (182mm × 128mm)

★ 플라스틱 판의 크기는
조정하십시오.


← 모서리는 둥글게주세요.

완성 예시

헤드 밴드 용
(두꺼운 종이에 붙여 넣습니다.)

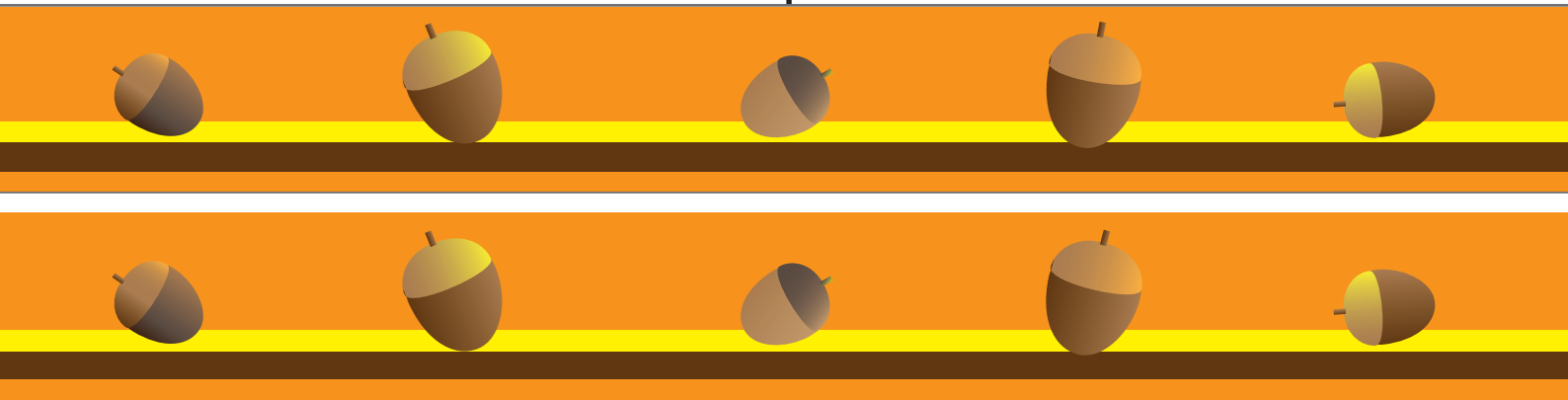

다람쥐

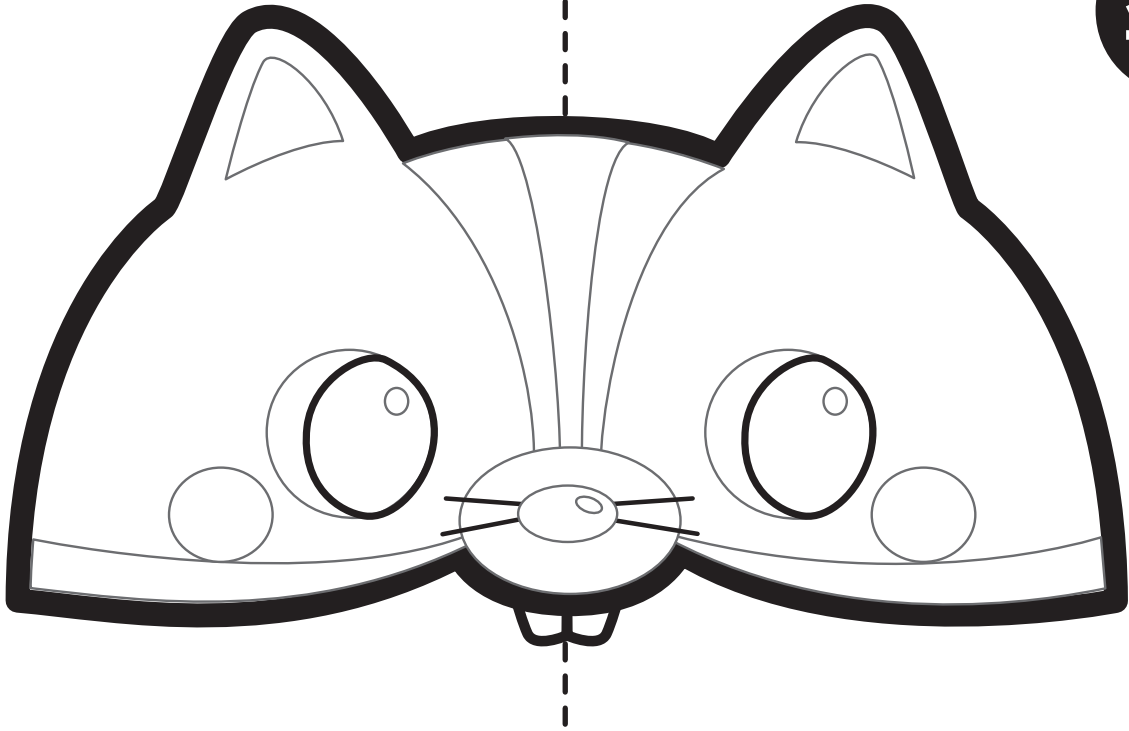

- ① 선을 따라 끊니다 (점선으로 접은 후 잘라도 OK입니다).
- ② 밴드 (약 25mm × 540mm) 을 ①의 뒷면에 테이프로 붙입니다.
- ③ 플라스틱 판 (B6 사이즈) 의 모서리를 둥글게 썰고 ①②의 뒷면에 테이프로 붙입니다.



플라스틱 판

B6 (182mm × 128mm)

★ 플라스틱 판의 크기는
조정하십시오.

← 모서리는 둥글게주세요.

완성 예시

헤드 밴드 용
(두꺼운 종이에 붙여 넣습니다.)

